

# Gesichtsmaske



Falten Sie die seitlichen Laschen um ca. 90°.




Falten Sie den unteren Teil. Stecken Sie die beiden seitlichen Laschen in die dafür vorgesehenen Schlitze (von innen nach außen).



Falten Sie nun den oberen Teil. Stecken Sie auch hier die seitlichen Laschen in die dafür vorgesehenen Schlitze (von außen nach innen).



Sie benötigen nun ein herkömmliches Papiertaschentuch, welches Sie seitlich vor die Atemöffnung schieben können. Dieses dient als Filter und lässt sich leicht auswechseln. Das Papiertaschentuch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

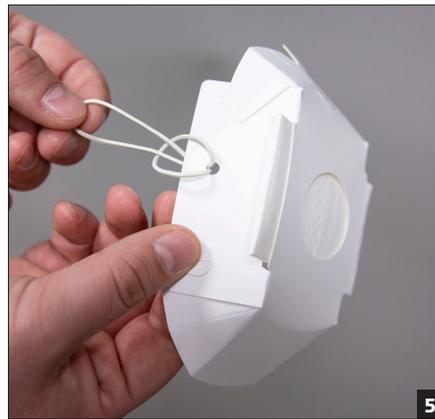

Fädeln Sie nun zwei der mitgelieferten Gummibänder in die beiden seitlichen Löcher. Für einen optimalen Tragekomfort können Sie die Bänder vorab etwas dehnen.



Falten Sie die Lasche auf der Oberseite nach innen und formen Sie den Bereich für die Nase aus.



Nun ist die Gesichtsmaske einsatzbereit.